

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO SORO FISIOLÓGICO

O **SORO FISIOLÓGICO** é uma solução apresentada em formato unidose, sem conservantes ou agentes tampão, que atua mediante as forças mecânicas de arrasto, sendo assim especialmente indicado para indivíduos com sensibilidade ocular e nasal.

As principais funções do **soro fisiológico** são:

- Com lentes de contacto:
 - o previne a desidratação das lentes de contacto hidrófilas.
 - o enxagua todos os tipos de lentes de contacto.
 - o é adequado para a dissolução de comprimidos enzimáticos.
- Instilação ocular:
 - o reduz o desconforto resultante de condições ambientais adversas, tais como ambientes com ar condicionado/aquecimento, ambientes secos, ambientes com fumo, etc.
- Irrigação nasal:
 - o alívio sintomático das secreções nasais.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Separe uma ampola do produto e abra-a com as mãos lavadas, fazendo rodar a parte de cima e assegurando que a ampola não entra em contacto com qualquer superfície.

- **Enxaguamento de lentes de contacto e dissolução de comprimidos enzimáticos:**
 - o Enxaguamento: Depois de completar o processo de limpeza ou sempre que necessário, coloque uma lente de contacto na palma da sua mão e lave com um fluxo abundante de soro fisiológico, friccionando a lente com a ponta dos dedos.
 - o Dissolução de comprimidos enzimáticos. Utilize a solução de acordo com as instruções do fabricante para o uso de comprimidos enzimáticos.
- **Utilização direta na superfície ocular:**
 - o Com ou sem as lentes de contacto colocadas no olho, aplique uma pressão ligeira na ampola para libertar algumas gotas de **soro fisiológico** sobre a superfície do olho as vezes que necessitar.
 - o Lavar as pálpebras: Embeba uma gaze com **soro fisiológico**, aplicando uma pressão ligeira sobre a ampola e aplique a gaze embebida sobre as pálpebras.
- **Utilização direta dentro das narinas**
 - o Incline a cabeça para trás.
 - o Insira o bico dentro de uma das narinas e aplique uma pressão ligeira sobre a ampola unidose. Repita o mesmo processo na outra narina. Endireite a cabeça para permitir a libertação de quaisquer tampões de muco e limpe o produto em excesso.
 - o Não assoe energicamente o nariz no espaço de 10 minutos a contar da administração. Em caso de crianças pequenas, administre o produto aplicando uma pressão mínima sobre a ampola para evitar qualquer risco de contaminação do ouvido médio.

PRECAUÇÕES

- Manter fora do alcance das crianças.
- Este produto não contém conservantes. Utilize imediatamente depois de aberta a ampola. Elimine qualquer solução restante após o uso, dado que pode estar contaminada e o respetivo uso pode provocar uma infecção.
- Uma ampola apenas deve ser utilizada pela mesma pessoa.
- A mesma ampola não deve ser utilizada para o tratamento de olhos e nariz em simultâneo.
- Não utilize após o prazo de validade.
- Não utilize se a ampola estiver danificada.
- Consulte um especialista em caso de irritação ocular ou das narinas.
- Não conservar a temperaturas acima de 25 °C.

COMPOSIÇÃO:

Solução estéril de cloreto de sódio a 0,9%.



FABRICANTE :

UNOLAB MANUFACTURING, S.L.
Av/ De las flores 6, 28970
Humanes de Madrid (Madrid), Espanha

